

Instrukcja obsługi – Reanimator, pompa resuscytacyjna HK dla cieląt #1032

Pompa resuscytacyjna HK jest przeznaczona do usuwania śluzu z jamy ustnej i nosa nowonarodzonych cieląt oraz do wspomagania resuscytacji krążeniowej w przypadku szczególnie trudnych porodów.

1. Usuwanie śluzu z jamy ustnej i nosa nowonarodzonych cieląt

Duża ilość śluzu w obrębie pyska i nozdrzy może powodować znaczne problemy w momencie rozpoczęcia oddychania przez cielę, a nawet doprowadzić do śmierci przez uduszenie. Ręczne usuwanie śluzu jest w takich przypadkach całkowicie niewystarczające.

Rozwiązaniem jest pompa resuscytacyjna HK.

1. Przyłóż otwór gumowej tulei do pyska lub nozdrzy, lekko dociskając.
2. Zasysaj śluz, pociągając uchwyt tłoka do siebie.
3. Następnie zdejmij pompę HK i odtóż ją na bok.
4. Naciśnięcie uchwyty powoduje przesunięcie tłoka w dół, a zassany śluz wypływa na zewnątrz.
5. Powtórz czynność tyle razy, ile uznasz za konieczne, aż większość śluzu zostanie usunięta.

2. Szybka resuscytacja układu krążenia w przypadku szczególnie trudnych porodów

Proces narodzin jest dużym obciążeniem zarówno dla matki, jak i dla cielęcia. W trudnych porodach — spowodowanych słabymi skurczami, nieprawidłowym ułożeniem płodu lub zbyt dużą masą cielęcia — dłuższy czas nacisku na klatkę piersiową może mieć kluczowe znaczenie dla życia noworodka.

Rozwój płuc oraz prawidłowe rozpoczęcie oddychania mogą zostać znacząco wspomagane dzięki użyciu pompy resuscytacyjnej HK.

Aby przeprowadzić resuscytację:

1. Wyciągnij uchwyt wraz z tłokiem pompy do maksymalnego położenia.
2. Przyłóż otwór gumowej tulei do pyska lub nozdrzy cielęcia.
3. Powoli wciśnij uchwyt tłoka.
4. Powtarzaj tę czynność według własnego uznania lub do momentu kiedy cielę zacznie oddychać samodzielnie.

Uwaga

Pompa resuscytacyjna HK musi być **dokładnie wyczyszczona i zdezynfekowana po każdym użyciu**.

Przechowywać w czystym i suchym miejscu.

Produkt objęty jest gwarancją zgodnie z obowiązującymi przepisami.